


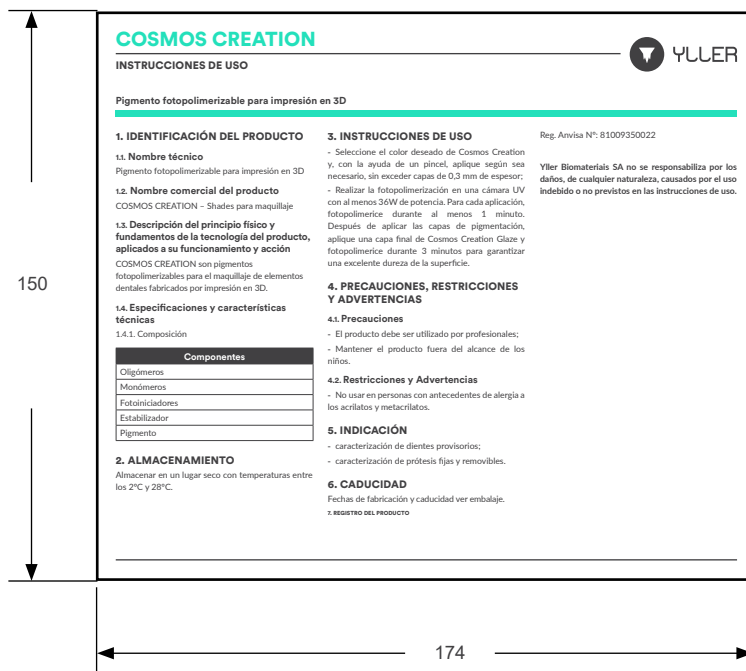

FRENTE



VERSO

PS;
Texto
meramente
ilustrativo;

BULA - COSMOS CREATION ESPANHOL

AF-0267

REV:00

Cód. Produto: N/A

25 de maio de 2020

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Dimensões Aberto

174mm largura

150mm altura

Dimensões Fechado

45mm largura

50mm altura

PAPEL:

Papel offset 63g

IMPRESSÃO:

Offset 2x2

Verde

C60 M0 K40 Y00

Cinza

C0 M0 Y0 K90

ACABAMENTO

4 dobras

Elaborado por: Guilherme Strey

Software: Adobe Illustrator

Finalização: Adobe Illustrator

Revisado por: Andressa Ludtke

Aprovado por: Aline Ogliari



YLLER

INSTRUCCIONES DE USO

Pigmento fotopolimerizable para impresión en 3D

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Nombre técnico

Pigmento fotopolimerizable para impresión en 3D

1.2. Nombre comercial del producto

COSMOS CREATION - Shades para maquillaje

1.3. Descripción del principio físico y fundamentos de la tecnología del producto, aplicados a su funcionamiento y acción

COSMOS CREATION son pigmentos fotopolimerizables para el maquillaje de elementos dentales fabricados por impresión en 3D.

1.4. Especificaciones y características técnicas

1.4.1. Composición

Componentes
Oligómeros
Monómeros
Fotoiniciadores
Estabilizador
Pigmento

2. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco con temperaturas entre los 2°C y 28°C.

3. INSTRUCCIONES DE USO

- Seleccione el color deseado de Cosmos Creation y, con la ayuda de un pincel, aplique según sea necesario, sin exceder capas de 0,3 mm de espesor;
- Realizar la fotopolimerización en una cámara UV con al menos 36W de potencia. Para cada aplicación, fotopolimerice durante al menos 1 minuto. Después de aplicar las capas de pigmentación, aplique una capa final de Cosmos Creation Glaze y fotopolimerice durante 3 minutos para garantizar una excelente dureza de la superficie.

4. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS

4.1. Precauciones

- El producto debe ser utilizado por profesionales;
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

4.2. Restricciones y Advertencias

- No usar en personas con antecedentes de alergia a los acrilatos y metacrilatos.

5. INDICACIÓN

- caracterización de dientes provisorios;
- caracterización de prótesis fijas y removibles.

6. CADUCIDAD

Fechas de fabricación y caducidad ver embalaje.

7. REGISTRO DEL PRODUCTO

Reg. Anvisa N°: 81009350022

Yller Biomateriais SA no se responsabiliza por los daños, de cualquier naturaleza, causados por el uso indebido o no previstos en las instrucciones de uso.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

YLLER BIOMATERIAIS SA

Dirección: Av. São Francisco de Paula, 3852

Tel.: (53) 3027 3933

www.yller.com.br / sac@yller.com.br

CUIT: 16.970.346/0001-52

Responsable técnico:

Aline de Oliveira Ogliari

CRO/RS N° 19623

Registro ANVISA N°: 81009350022

FACA

