



Make Smile

By Fabiano Detoni



Make Smile

Es el material más completo y versátil, creado para dar policromía a materiales compuestos, acrílicos, impresión 3D y PMMA, mediante maquillaje y micro estratificación 3D. Permite personalizar, crear efectos, cambiar tonos, valores de color y fluorescencia en prótesis dentales y restauraciones directas e indirectas.

Técnicamente, es un composite nanohíbrido fotopolimerizable con aproximadamente un 79% de relleno inorgánico, en peso, en composites fill y un 49% en composites flow; una mezcla de micro y nanopartículas con tamaños que van desde 2 μ m hasta 5nm. Esta distribución de tamaño permite una compactación más eficiente del relleno, ya que las partículas más pequeñas llenan los espacios entre las más grandes, lo que resulta en restauraciones y piezas protésicas más estéticas, con longevidad del pulido y excelentes propiedades mecánicas.



El sistema de caracterización Make Smile está compuesto por 17 resinas con colores y opacidades capaces de reproducir dientes y encías de aspecto natural. Además, cuentan con viscosidades especialmente diseñadas para una fácil y rápida aplicación en piezas pequeñas y grandes, sin incorporación de burbujas.

Los composites para encías PINK (rosa), LIGHT (claro) y DARK (oscuro) están disponibles en dos viscosidades diferentes:



Flow


Opaco para obtener el tono deseado con menos material aplicado. Recubrimiento rápido sin interferencias del tono base de la pieza en el resultado deseado. También se puede utilizar como opacificante.

Viscosidad pastosa: proporciona un mayor control de la aplicación.



Fill

Translúcido de alta viscosidad para reproducir la textura de las encías de forma natural.

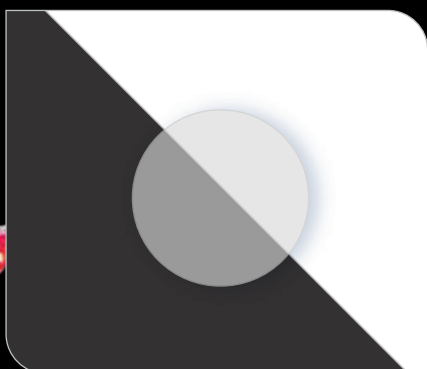

Fill Translúcido

Alta viscosidad. Es un complemento, con base neutra para aplicación de las más variadas formas.

Puede utilizarse como textura para encías y dientes.

Mezclado con el glaze, se convierte en un composite fluido, que puede ser usado con pigmentos o modificadores para un efecto 3D y microestratificaciones superficiales.



Diluyente Glaze

Perfecto para recubrir porosidades y proporcionar sellado/glaseado de la superficie, incluso en áreas de difícil acceso, sin necesidad de pulido. En dos versiones, **fluorescente y no fluorescente**, se puede aplicar a regiones del tejido dental y gingival sin comprometer el efecto óptico.

El fluorescente se puede incorporar a todas las resinas del Kit cuando el efecto fluorescente sea necesario.



Tono

Opaco de baja viscosidad. Alto valor de color para ajustes cromáticos. Cuatro tonalidades: A, B, C y D.



Pigmentos

Los 6 pigmentos o modificadores, en los colores rojo, azul, negro, blanco, marrón y amarillo permiten crear innumerables tonos y valores cuando se mezclan entre sí, en los tonos, en encías fill o flow, o incluso en translúcidos, permitiendo posibilidades ilimitadas al usuario.




Encía Fill

Encía Flow

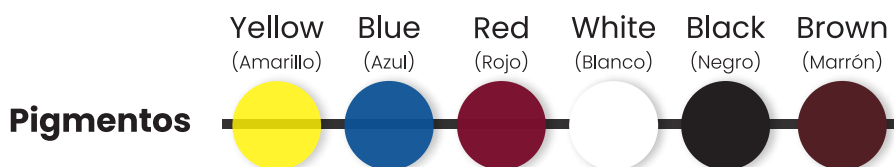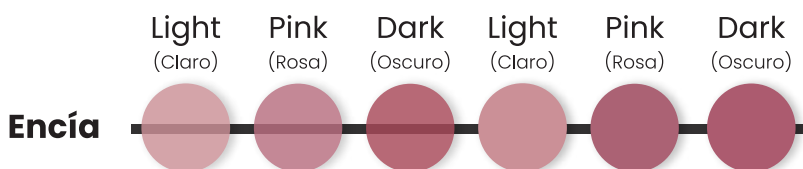

Translúcida

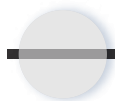

Todos los elementos son compatibles entre sí, pueden mezclarse, controlarse y modificarse de la forma deseada, lo que hace con que **MAKE SMILE** sea indispensable para los profesionales de la odontología restauradora.





T.P.D. Fabiano R. Detoni
(Técnico en Prótesis Dental)

Con Make Smile puedo conseguir cualquier resultado deseado, desde resolver los trabajos más sencillos hasta los más exigentes y complejos, el límite es mi propia creatividad. Cada detalle fue pensado para reproducir las formas, texturas y colores naturales de dientes y encías con excelencia y rapidez.



Hacé click en el QR
para ver el precio
y mas información
del producto



IMPORTA Y DISTRIBUYE

